


猛健樂[®] 筆

MOUNJARO[®] KwikPen (tirzepatide)



組件指引

MOUNJARO 注射筆組件

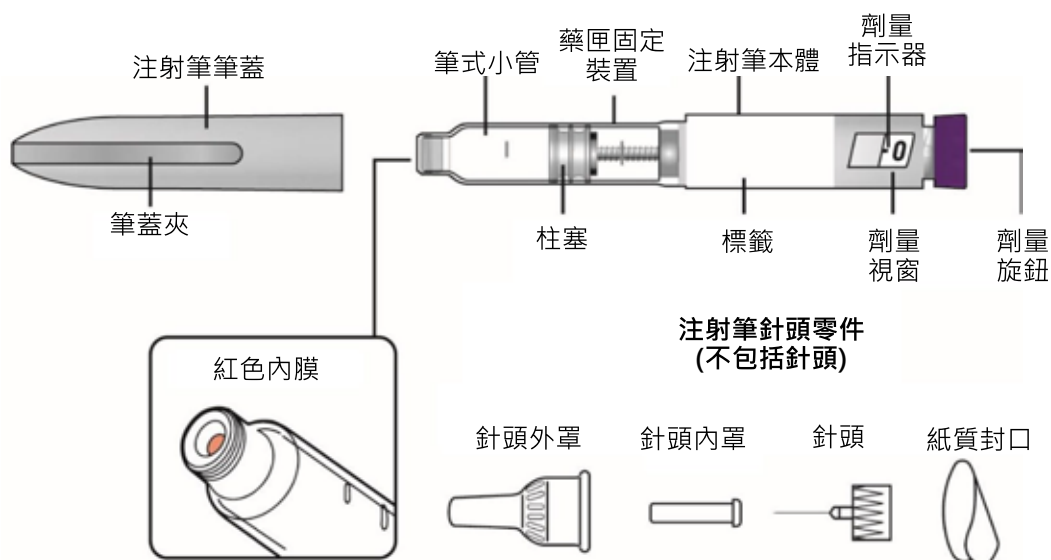


準備注射 MOUNJARO




步驟一：

- 以肥皂與清水洗滌您的雙手。

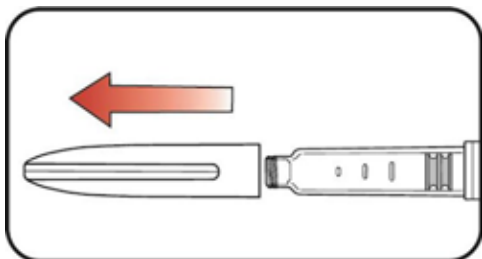


步驟二：

- 將注射筆蓋直直拔起打開。
- 檢查注射筆和標籤。若有下列情況，請勿使用：
 - 藥物名稱或劑量不符您的處方資料。
 - 注射筆已過期(EXP)或看起來已損壞。
 - 藥物已冷凍、有顆粒、混濁或變色。MOUNJARO 無色至淡黃色。

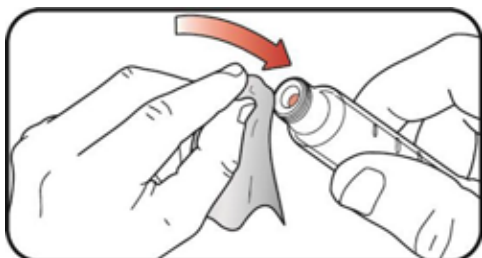


步驟三：

- 以酒精棉片擦拭紅色內膜。

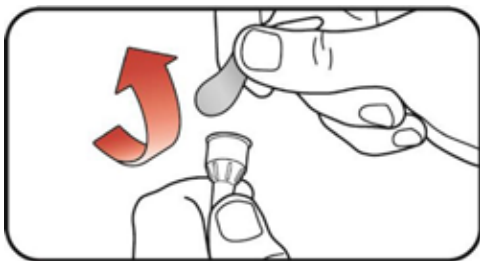


步驟四：

- 選擇一支新的注射筆針頭。每次注射一定要使用新的注射筆針頭，以避免感染與針頭阻塞。
- 撕開針頭外罩的紙質封口。

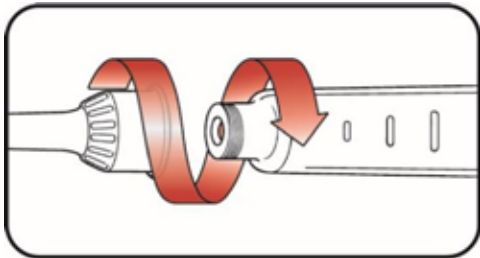

步驟五：

- 將蓋上蓋子的注射筆針頭直直推到注射筆上，然後旋轉注射筆針頭，直至拴緊為止。

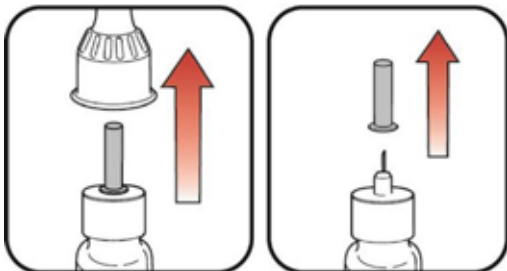


a. 針頭外罩

b. 針頭內罩


步驟六：

- 取下針頭外罩，並將其留下。這將會重複使用。
- 拔掉針頭內罩。將其丟入居家廢棄物中。

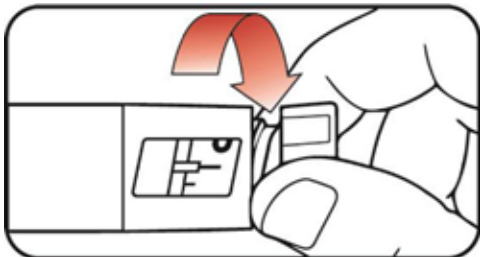


步驟七：

- 慢慢旋轉劑量旋鈕，直到您聽到 **2 聲喀擦聲**，且  長線條顯示在劑量視窗中。
- 這是灌注位置。這可以藉由將劑量旋鈕向任意方向旋轉，直到灌注位置與劑量指示器對齊為止來進行修改。

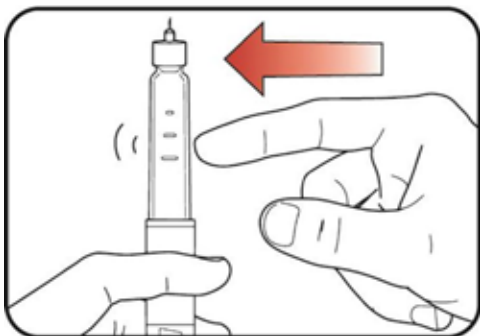

步驟八：

- 以針頭指向上的方式握穩您的注射筆。
- 輕敲藥匣固定裝置，將氣泡聚集到上方。

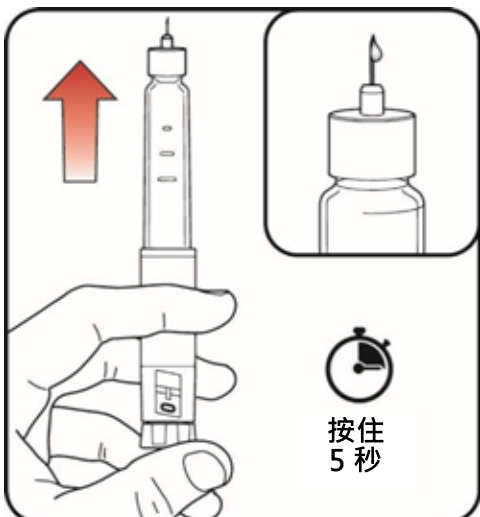


步驟九：

- 藉由按下劑量旋鈕直到停止為止，然後按住劑量旋鈕慢慢數到 5 來將部分藥物釋入空氣中。  圖示必須顯示在劑量視窗中。
- 請勿注射進您的體內。**

灌注可以排除藥匣中的空氣，並確保您的注射筆正常運作。





若注射筆針頭尖端流出少量藥物，則您的注射筆已完成灌注。

- 若您未看見藥物，請重複進行**步驟 7 - 9**，最多另行嘗試 2 次。
- 若您仍未看見藥物，請更換注射筆針頭並重複進行**步驟 7 - 9**，最多另行嘗試 1 次。
- 若您仍未看見藥物，請聯絡您的醫療照護提供者，以取得更多指示。

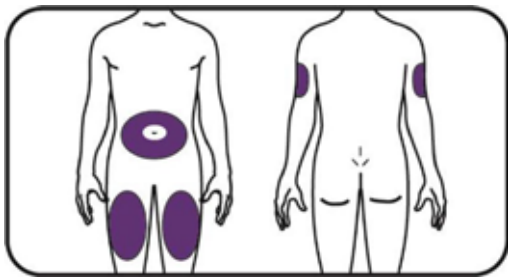

a. 正面

b. 背面

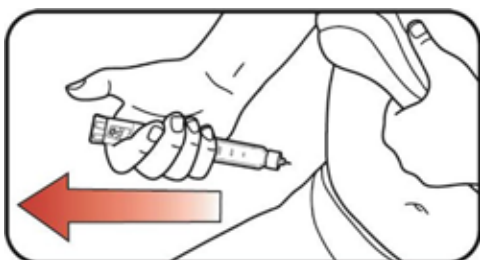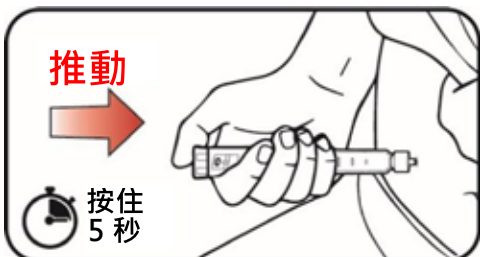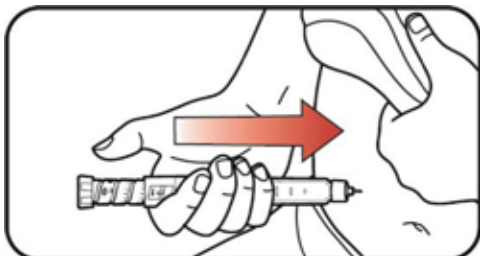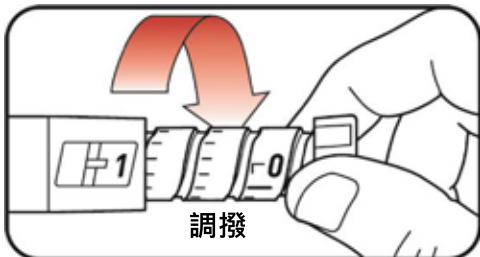

步驟十：

- 選擇注射部位。
 - a. 您或其他人可以將藥物注射到離肚臍至少 5 公分的大腿或肚子(腹部)中。
 - b. 應由其他人於您的上臂後側進行注射。
- 每週**更換(輪流)**您的注射部位。您可以使用身體相同區域，但請務必選擇該區域不同的注射部位。

步驟十一：

- 旋轉劑量旋鈕，直到旋鈕停止，且劑量視窗顯示 **1** 圖示為止。**1** 圖示等同於完整的 0.6 mL 劑量。

步驟十二：


- a. 將針頭刺入您的皮膚中。
- b. 藉由**按下劑量旋鈕**直到停止為止，然後**按住劑量旋鈕慢慢數到 5** 來注射藥物。在取出針頭前，劑量視窗必須顯示 **0** 圖示。

步驟十三：

- 將針頭拔出您的皮膚。針頭尖端有一滴藥物是正常的。這不會影響到您的劑量。
- 確認劑量視窗中有 **0** 圖示。
 - 若您在劑量視窗中看到 **0** 圖示，則您已接受了完整的劑量。
 - 若您在劑量視窗沒看到 **0** 圖示，請將針頭插回皮膚並完成注射。**請勿重新調撥劑量。**
 - 若您仍認為未獲得完整的劑量，**請勿重新開始或重複進行注射**。請聯絡您的醫療照護提供者，以取得更多指示。


步驟十四：

- 若您將針頭拔出皮膚時看到血，請用紗布或棉球輕輕地按住注射部位。
請勿搓揉注射部位。

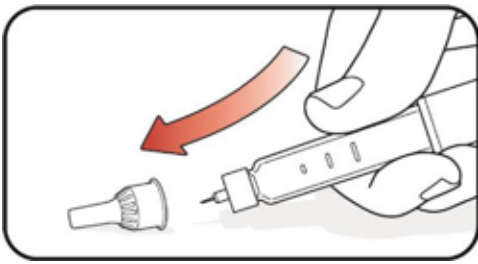

步驟十五：


- 請小心地將針頭外罩蓋回去。

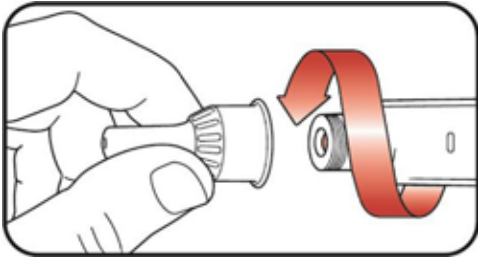

步驟十六：

- 轉開蓋上蓋子的針頭，並將針頭放入尖銳物品容器中(請參閱「棄置 MOUNJARO 和針頭」)。

請勿將注射筆連同針頭一起保存，以避免滲漏、針頭阻塞，以及空氣進入注射筆。

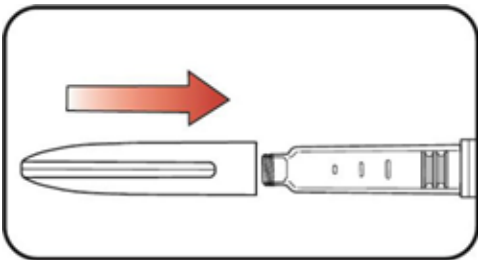

步驟十七：

- 更換注射筆蓋。

請勿在未蓋上注射筆蓋的情況下儲存注射筆。

棄置 MOUNJARO 和注射筆針頭

- 使用後，將使用過的注射筆針頭立即放入所在國家認可的尖銳物品保存容器中。
- **請勿**將脫離之注射筆針頭丟棄(棄置)至居家廢棄物中。
- 在您取下針頭後，將用過的注射筆棄置在居家廢棄物或所在國家認可的尖銳物品保存容器中。
- 若您沒有所在國家認可的尖銳物品保存容器，可使用符合以下條件之家用容器：
 - 由強化塑膠製成，
 - 可由緊密且防穿刺之蓋子關閉，使尖銳物品無法掉出，
 - 使用時可直立且穩固放置，
 - 防滲漏，且
 - 具有適當標示，警告容器內含有危險廢棄物。
- 當尖銳物品保存容器將近裝滿時，請遵循您所在國家與當地法律的規定來處理已裝滿的保存容器，注射針頭與注射器。
- 除非您的社區準則允許，否則請勿將使用過的尖銳物品保存容器丟入居家廢棄物中。請勿回收使用過的尖銳物品保存容器。

疑難排解

- 若您無法取下注射筆蓋，請輕輕地來回旋轉注射筆蓋，然後將注射筆蓋直直地拔起打開。
- 若很難按下劑量旋鈕：
 - 更緩慢地按下劑量旋鈕會使注射變得更容易。
 - 您的針頭可能阻塞了。換上一個新的注射筆針頭並重新灌注注射筆。
 - 您的注射筆裡可能有灰塵、食物或液體。請丟棄並換一支新的注射筆。